


Fructoseunverträglichkeits-Test

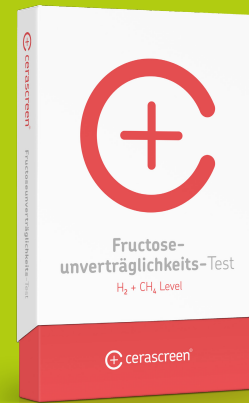

Mit Atemgastest Reaktion auf Fructose überprüfen

Falls Sie unter Magen-Darm-Beschwerden und Schwindel leiden, könnte eine Fructoseunverträglichkeit die Ursache sein. Häufig wird in diesem Zusammenhang von Fructosemalabsorption gesprochen, die (fälschlicherweise) oft als Fructoseintoleranz bezeichnet wird. Diese Malabsorption tritt auf, wenn der Dünndarm Fruchtzucker (auch Fructose oder Fruktose genannt) nicht ausreichend aufnehmen kann. Fruchtzucker ist insbesondere in Obst, Gemüse, Fruchtsäften, Honig und vielen Süßwaren enthalten und kann bei einer eingeschränkten Aufnahme im Dünndarm Beschwerden hervorrufen.

Mit dem cerascreen® Fructoseunverträglichkeits-Test können Sie die Wasserstoff- und Methankonzentration in Ihrer Atemluft nach dem Verzehr von 420 ml Apfelsaft messen. Erhöhte Werte dieser Gase deuten auf eine Fructose- bzw. Fruktosemalabsorption hin.

- + einfach + bequem zuhause Probe entnehmen
- + Analyse im professionellen medizinischen Fachlabor
- + umfangreicher Ergebnisbericht
- + konkrete Handlungsempfehlungen und Ernährungstipps
- + inkl. 15-minütige Telefonberatung für weitere Fragen und Ernährungsberatung

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.

Fructoseunverträglichkeits-Test



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme mehrerer Atemgasproben benötigen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen[®]-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Fructoseunverträglichkeits-Test

Der Fructoseunverträglichkeits-Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Fructoseunverträglichkeits-Test nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Fructoseunverträglichkeits-Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Fructoseunverträglichkeits-Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu da, Krankheiten zu diagnostizieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Fructoseunverträglichkeits-Test:
<https://www.cerascreen.de/products/fructoseunvertraeglichkeits-test>



PZN 19441600

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

